



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 1100 0405  
**MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE 3 CAPAS**



### Advertencias

Esta mascarilla **NO ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA** y no debe utilizarse para proteger la salud del usuario.

**No utilizar en ambientes potencialmente peligrosos para las vías respiratorias.**

**Material:** 100% polipropileno  
**Empaquetado:** cajas de 50 unidades  
**Uso:** Quirúrgico

 **UNE 14683:2019 + AC**  
**CLASE 2**

### Aplicaciones

Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas del aire.

Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva.

### Advertencias

La eficiencia de Filtración Bacteriana (EFB) es el porcentaje de eficiencia de la mascarilla para filtrar microorganismos. La eficiencia de la mascarilla es >99.9%.

Filtración certificada por AITEX textile research institute, con nº de certificado 2020TM1797.

### Mascarilla con tres capas

1. Capa externa resistente a penetración de fluidos (Blanca).
2. Filtro que proporciona una eficacia de filtración >99.9% para partículas de 3.0 micrón.
3. Capa blanca interna suave en contacto con la piel.

ES Alto B.FE y P.FE. filtración

Apto para piel sensible

Ajuste cómodo y respiración fácil

Goma para la oreja de alta elasticidad



**Sin tintes.**

**Talla única universal.**

**Elástico para ajustarse a las orejas.**

Ref		
1100 0405	1	50





## FICHA TÉCNICA

### *Asegúrese siempre de que esta mascarilla*

- 1) Es la adecuada para la medida higiénica que va a realizar.
- 2) Se ajusta correctamente a la cara
- 3) Se lleva durante todo el tiempo de trabajo
- 4) Se sustituye cuando sea necesario

### *Instrucciones de Ajuste*

- 1) Apoye la barbilla en la mascarilla con el clip nasal hacia arriba

